



## 2. Hece Sayısı'nı Dinleyip Yakalamak

Bu etkinlikte uzun kelimeler kısa kelimeler ile karşılaştırır. Örnek olarak isimleri ve yaygın kullanan kelimeleri seçtik, ancak dinleyici olarak sizin için anlamlı olan kelimeleri kullanmanız daha motive edici ve yararlı olabilir. Hecelerin sayısına göre karşılaştırılacak kelimeleri seçiniz. 1 hece, 4 hece kelimesi ile karşılaştırıldığında büyük bir fark olur. Bu, 2 hece ile 2 hece kelimesi arasında ayırım yapmaktan daha kolay olacaktır.

Aşağıdaki kelimeleri veya birlikte oluşturduğunuz kelime listenizden, dinleyiciye ilk kelime çiftini gösteriniz; Ayşe Hanım, Gül. Her birini söylediğiniz gibi işaret edin ve dinleyiciden sizden sonra söylemesini isteyiniz. Bu, dinleyiciye kelimenin nasıl duyulduğunu öğretir. Sonra kelimelerden birini işaret etmeden tekrar sununuz ve dinleyicinin hangi sözcük olduğunu tanımlamasını sağlayınız. Dinleyicinin cevabının doğru olup olmadığını bilmesi için anında geri bildirim sağlayınız.

1 hece 4 hece ile kıyaslama	Ayşe Hanım	Cem
1 hece 3 hece ile kıyaslama	Ali Bey	Ben
1 hece 2 hece ile kıyaslama	Tavşan	At
1 hece 2 hece ile kıyaslama	Erkek	Kız
3 hece 3 hece ile kıyaslama	Ayşecan	Ataberk
2 hece 2 hece ile kıyaslama	Gizem	Adnan

## 3. Belirli Sesleri Dinleme

Aşağıdaki etkinlikler "Ş" sesini hedefler. Sık kullanılan kelimeleri örnek olarak seçtik, ancak 'Ş' sesiyle dinleyici olarak sizin için anlamlı olan başka kelimeler de seçebilirsiniz. Bir sonraki sayfadaki kelime listesine bakınız. Konuşmacı her kelimeyi birer birer söylemelidir. Söylemeden önce her kelimeyi işaret ediniz ve dinleyiciyi her kelimeyi tekrarlamaya teşvik ediniz. Bu, dinleyiciye faydalı bir uygulama sağlar. Ardından, listedeki kelimelerden birini işaret etmeden tekrar sununuz ve dinleyicinin hangi sözcük olduğunu tanımlamasını sağlayınız. Alıcının yanıtının doğru olup olmadığını bilmesi için hemen geri bildirim sağladığınızdan emin olunuz. Bu zorsa, seçenek sayısını azaltınız, örneğin alıcının aralarından seçim yapabileceği yalnızca üç kelime gösteriniz veya aralarından seçim yapabileceğiniz bir çift seçenek veriniz; daha

fazla kontrast için listeden bir kısa kelime ve bir uzun kelime seçiniz. Rastgele kelime listesine devam ediniz.

Bu işlem aşağıdaki alıştırmalarla kullanılabilir.

Kelimedeki belirli sesleri dinlemeyi daha zor hale getirmek için, hedef kelimelerinizin her biri için bir cümle oluşturunuz, örneğin "Her sabah şarkı söylerim."

Bunları yazınız ve dinleyiciden söylediğiniz cümleyi tanımlamasını isteyiniz. İsterseniz aşağıdaki hazır olan cümleleri kullanınız.

**[ş] sesi ile başlayan kelimeler**

ŞARKI

ŞAKA

ŞEHİR

ŞEF

ŞIK

ŞİMDİ

ŞUBE

ŞİMŞEK

ŞÖHRET

ŞÜPHE

**Cümle içinde**

Konserde şarkı söyleyeceğini anlatmadı mı?

Şahin şaka anlattı, hepimiz güldük.

Tramvay ile şehir modernleşecek.

Kliniğin yeni şefi kim olacak?

Gala yemeğinde herkes çok şık idi.

Şimdi yap yoksa babana söyleyeceğim.

Sen hangi şubeye gittin?

Geçen yıl bu ağaca şimşek çarptı.

Sahnede şöhret arıyor.

Ondan çok şüpheleniyorum.

**[ş] sesi ortada bulunan kelimeler**

AKŞAM

BAŞKAN

MEŞGUL

YEŞİL

HAŞLAMA

KEŞKE

ŞİŞE

ÇEŞİT

EŞYA

DÖŞEK

**Cümle içinde**

Geçen hafta her akşam yürüdüm.

Oturum başkanını geç geldi, bundan dolayı uzadı.

Babam hep meşgul, onu çok az görüyoruz.

Ağaç diktiler her taraf yeşil oldu

Diyette haşlama var, kızartma yok.

Keşke bunu doğru yapsaydın!

Şişeleri ayrı yere koymayı unuttunuz mu?

Büyük mağazalarda çeşit daha çok.

Piyango çıkınca eşyaları değiştirdiler.

Yatağımıza yeni döşek aldık.

Evde Duy 6. Ders Sayfa 5

**[ş] sesi sonda bulunan kelimeler**

YAVAŞ

BEŞ

GENİŞ

HOŞ

ŞİŞ

TUŞ

GİRİŞ

DİŞ

KAŞ

KUMAŞ

**Cümle içinde**

Öğrenemiyor, kafası yavaş çalışıyor!

Beş gün tatil yapacağım.

Evleri çok geniş, salonu bizimkinden daha büyük.

Çocuk ne kadar hoş, ona kızını verecekler.

Listeye şiş yaz, eskileri paslandı.

Yeşil tuşa basın diyor.

Afedersiniz, giriş nerede biliyor musunuz?

Sık sık diş fırçaları değiştirmeli .

Kalın kaş hoşuma gider.

Beğendiğimiz mavi kumaşı alacak mısınız?

Evde Duy 6. Ders Sayfa 6